

Español

Instrucción de uso: IFU-00105 -0001

N° MS/ANVISA: 10396830070

ANVISA Nombre Técnico: Instrumentos para uso dental

Nombre Comercial de la Familia ANVISA: LLAVE PARA CONTRA ÁNGULO

Importante: Para consultar las Instrucciones de Uso, verifique la versión indicada en la etiqueta del producto junto con el código y acceda al archivo digital en www.morelli.com.br/IFU. Para obtener una Instrucción de Uso impresa, libre de costos de emisión y envío, comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando al 0800 0121455 / 0800 7031455 o al correo electrónico sac@morelli.com.br. Para composiciones químicas solicitar la Ficha de Seguridad del Producto.



Fabricado por:

Dental Morelli Ltda.

📍 Alameda Jundiaí, 230/250 - Jardim Saira

CEP/ Código Postal: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil

☎ Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsable técnico: Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

☎ Tel.: 351 21 4439292

LLAVE PARA CONTRAÁNGULO



El llave de contraángulo es un dispositivo que se utiliza para accionar la pluma dental de baja velocidad sin necesidad de un micromotor. Es un mango de un solo cuerpo que se acopla al sistema de accionamiento mecánico del contra-ángulo, favoreciendo el funcionamiento del contra-ángulo con rotación controlada manualmente.

Está indicado para facilitar la instalación de minitornillos en lugares de acceso limitado.

Indicación de uso:

El producto está indicado para facilitar la instalación de Minitornillos de Ortodoncia en:

- paladar duro;
- Cresta infracigomática (IZC);
- estante bucal;
- Tuberosidad maxilar;
- Sitios posteriores donde se requiere una instalación basada en el eje dentario largo.

Indicación de paciente: todas las edades con indicación de tratamiento de ortodoncia.

Usuario previsto: uso e instalación por un profesional calificado.

Contra indicaciones:

Morelli suministra este(s) producto(s) únicamente a profesionales calificados, quienes son responsables de identificar las condiciones que hacen que este(s) producto(s) esté(n) contraindicado(s) para el tratamiento. Siempre que se utilice correctamente, para el fin indicado y de acuerdo con las instrucciones de uso, no se identifican contraindicaciones en cuanto al uso de este(s) producto(s).

Efectos colaterales:

Morelli suministra este(s) producto(s) únicamente a profesionales calificados, quienes son responsables de identificar y comunicar al paciente la posibilidad de cualquier efecto secundario no deseado. Siempre que se utilice correctamente, para el fin indicado y siguiendo las instrucciones de uso y contraindicaciones, no se identifican efectos secundarios con respecto al uso de este(s) producto(s).

Limpieza y esterilización:

Para una limpieza y esterilización segura y eficaz, utilice las "INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN" en www.morelli.com.br/IFU. Para facilitar la búsqueda en el sitio, el documento se encuentra junto al código del producto.

Validez:

120meses.

Advertencias:

Producto no esterilizable en horno seco.

Después de la esterilización, mantenga el producto en su embalaje de esterilización, almacenado en un lugar seco y libre de suciedad.

Ábralo solo cuando esté en uso.

El final de la vida útil del instrumento también está determinado por el desgaste y los daños causados por el uso.

Los productos solo deben ser utilizados por profesionales calificados en ortodoncia y solo deben usarse para el propósito previsto.

Todos los productos se envían en condiciones no estériles y deben limpiarse y esterilizarse antes del primer uso, así como en cada uso posterior.

Verifique las condiciones de uso del instrumento antes de cada procedimiento, respetando su vida útil y garantizando así su perfecto funcionamiento. Su procesamiento ha sido validado dentro de 100 usos, se recomienda su reemplazo.



Producto esterilizado por vapor en autoclave hasta 121°C / 250°F. Debido a que se utilizan en el cuerpo humano, pueden presentar riesgos asociados a su uso, debiendo garantizarse su esterilidad.



Este producto contiene níquel y cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a estos metales. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, oriente al paciente a buscar un médico.

Uso en múltiples pacientes y múltiples veces.

En caso de problemas graves derivados del uso del producto, es importante que el profesional cualificado y/o el paciente informen al fabricante o a la autoridad competente del país en el que reside.

Para uso exclusivo de profesional calificado.

No utilice el producto si la embalaje está danada o abierto, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles falsificación de productos.

ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Codigos:

¹ Organismo de Certificación

Código	Quantidade	CE	Org ¹
37.20.016	01 UN.	C E	2797

Revisión	Cambios
0	Elaboración y disponibilidad en el portal Morelli.
1	Revisión de advertencias e inclusión del Organismo de Certificación.