

Español

Instrucción de uso:IFU-00022 -0003

N° MS/ANVISA:10396830058

ANVISA Nombre Técnico:Componentes para Ortodoncia

Nombre Comercial de la Familia ANVISA:CURSOR MESIALIZADOR E DISTALIZADOR

Importante: Para consultar las Instrucciones de Uso, verifique la versión indicada en la etiqueta del producto junto con el código y acceda al archivo digital en www.morelli.com.br/IFU . Para obtener una Instrucción de Uso impresa, libre de costos de emisión y envío, comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando al 0800 0121455 / 0800 7031455 o al correo electrónico sac@morelli.com.br . Para composiciones químicas solicitar la Ficha de Seguridad del Producto.



Fabricado por:

Dental Morelli Ltda.

📍 Alameda Jundiá, 230/250 - Jardim Saira

CEP/ Código Postal: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil

☎ Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsable técnico: Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

☎ Tel.: 351 21 4439292

Cursor Mesializador y Distalizador



Es un dispositivo intraoral entre arcadas que promueve la distalización o mesialización de los elementos dentales mediante la aplicación de fuerza generada por resortes o elásticos anclados al esqueleto.

El dispositivo permite el control de la fuerza por medio de un tornillo Gurin, que se puede posicionar a lo largo del arco del cursor, modificando la intensidad de la fuerza aplicada al diente.

Los cursores están disponibles en 3 tamaños, para el lado derecho e izquierdo de los arcos.

Indicación de uso:

a) Clasificación de ángulos:

- Clase I
- Clase II
- Clase III

b) Problemas de dientes y huesos:

- Maloclusiones;
- Mesialización;
- Distalización;
- Tirando de dientes;
- Corrección de pendiente.

Manejo:

El gancho se posiciona a lo largo del mango con un simple apriete roscado utilizando una llave hexagonal específica (**ref. 75.02.011**).



Todos los cursores requieren el uso de la llave hexagonal.

*Usar en múltiples pacientes y múltiples veces.

Contra indicaciones:

Morelli suministra los productos solo a profesionales calificados. Es responsabilidad exclusiva del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicadas para el tratamiento, tales como:

- Pacientes con deficiencia de higiene bucal.
- Pacientes que no pueden cooperar con el tratamiento.
- Alergia a cualquiera de los materiales de aparatos de ortodoncia.
- Enfermedades o otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia.
- Uso en entorno de Resonancia Magnética.

Efectos colaterales:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y/o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados.

Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir:

- Descalcificación;
- Reabsorción radicular;
- Complicaciones periodontales;
- Reacciones alérgicas;

- Dificultad en el mantenimiento de la higiene bucal;
- Dolor;
- Incomodidad;
- Hiperplasia gingival;

Validez:

120meses.

Advertencias:

No utilice este producto en un ambiente de resonancia magnética, ya que puede ocasionar interferencias en las imágenes durante el examen. Cabe al profesional de ortodoncia advertir al paciente sobre esta contraindicación y providenciar la remoción del aparato caso necesario.



Este producto contiene níquel y cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a estos metales. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, oriente al paciente a buscar un médico.



Producto no reutilizable, ya que su reutilización puede provocar infecciones cruzadas y pérdida de propiedades mecánicas por desgaste natural.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas de finalidad de uso, se recomienda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

No utilice el producto si la embalaje está danada o abierto, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles falsificación de productos.

Cabe al profesional cualificado orientar a sus pacientes del riesgo de aspiración y deglución en la hipótesis de quiebra/desprendimiento de las piezas, no debe subestimar las posibles complicaciones inmediatas o tardías derivadas de ese tipo de accidentes y precisa informar adecuadamente al paciente y/o sus responsables legales sobre los riesgos inherentes al acontecimiento y las conductas a tomar.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para evitar la aparición de placa bacteriana y tártaro o enfermedades como la inflamación gingival (gingivitis), la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

Para proteger la mucosa del contacto con el Cursor, si es necesario, coloque dos eslabones de Elástico en Cadena Corta en la parte posterior del Gurin, como se muestra en la siguiente figura:



ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Codigos:

¹ Organismo de Certificación

Código	Longitud	Escribe	Quantidade	CE	Org ¹
30.45.011	12 mm	Curto - Sup. Esquerdo / Inf. Direito	5	-	-
30.45.012	12 mm	Curto - Sup. Direito / Inf. Esquerdo	5	-	-
30.45.013	18 mm	Médio - Sup. Esquerdo / Inf. Direito	5	-	-
30.45.014	18 mm	Médio - Sup. Direito / Inf. Esquerdo	5	-	-
30.45.015	32 mm	Longo - Sup. Esquerdo / Inf. Direito	5	-	-
30.45.016	32 mm	Longo - Sup. Direito / Inf. Esquerdo	5	-	-

Revisión	Cambios
0	Elaboración y disponibilidad en el portal Morelli.
1	Actualización de mascarillas, avisos y ajuste de idioma.
2	Actualización de la simbología Ni/Cr.
3	Configuración de lenguaje.