

Español

Instrucción de uso:IFU-00059 -0004

N° MS/ANVISA:10396830037

ANVISA Nombre Técnico:Componentes para Ortodoncia

Nombre Comercial de la Familia ANVISA:BRACKETS, BANDAS Y TUBOS

Importante: Para consultar las Instrucciones de Uso, verifique la versión indicada en la etiqueta del producto junto con el código y acceda al archivo digital en www.morelli.com.br/IFU . Para obtener una Instrucción de Uso impresa, libre de costos de emisión y envío, comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando al 0800 0121455 / 0800 7031455 o al correo electrónico sac@morelli.com.br . Para composiciones químicas solicitar la Ficha de Seguridad del Producto.

**Fabricado por:**


Dental Morelli Ltda.

📍 Alameda Jundiaí, 230/250 - Jardim Saira

CEP/ Código Postal: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil

☎ Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsable técnico: Roger Morelli CREA-SP 5060214985

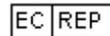

Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

☎ Tel.: 351 21 4439292

Soldadura de Plata




La aleación Soldadura de Plata se utiliza en ortodoncia para la soldadura fuerte, que consiste en la unión entre dos partes metálicas mediante la fusión y solidificación de una tercera parte denominada material de adición, en este caso, la Soldadura de Plata.

Es ideal para aplicación en aceros inoxidable, ya que presenta una coloración cercana, además de minimizar la corrosión bajo tensión en los componentes de este material.

Indicación de uso:

Descripción de las situaciones de aplicación clínica más comunes:

- Disyuntor palatal tipo HAAS;
- Disyuntor palatino tipo HIRAX;
- Lazo/Botón de Nance;
- Arco Lingual.

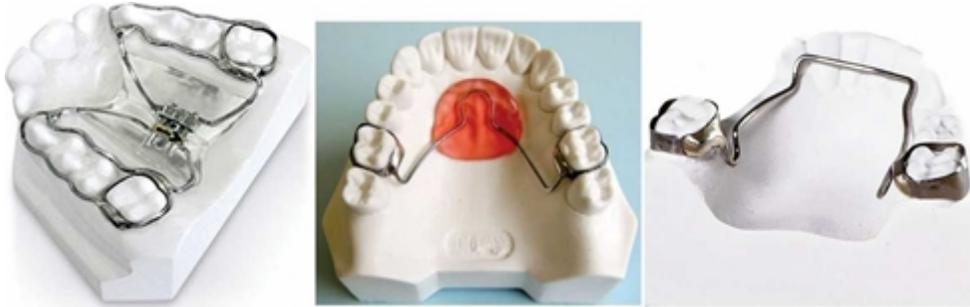

Indicación de paciente: todas las edades con indicación de tratamiento ortopédico y/o de ortodoncia.

Usuario previsto: uso e instalación por un profesional calificado.

Punto de fusión:

Características	oh
En rollo 56% (Ag) / Fusión = 650 °C	0,5 mm
En Barra 56% (Ag) / Fusión = 650 °C	0,8 mm
En Barra 56% (Ag) / Fusión = 650 °C	0,8 mm

Contra indicaciones:

Morelli suministra los productos solo a profesionales calificados. Es responsabilidad exclusiva del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicadas para el tratamiento, tales como:

- Pacientes con deficiencia de higiene bucal.
- Pacientes que no pueden cooperar con el tratamiento.
- Pacientes con ambiente bucal propicio a desmineralización del esmalte dental.
- Alergia a cualquiera de los materiales de aparatos de ortodoncia.
- Enfermedades o otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia.
- Reabsorción radicular.
- Resorción ósea existente.

- Descalcificación existente en el esmalte dental.
- Uso en entorno de Resonancia Magnética.

Efectos colaterales:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y/o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados. Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir:

- Daños en la mucosa oral y lengua;
- Dificultad para hablar o masticar;
- Decoloración de los dientes;
- Descalcificación;
- Reabsorción radicular;
- Complicaciones periodontales;
- Dificultad en el mantenimiento de la higiene bucal;
- Reacciones alérgicas;
- Dolor;
- Incomodidad;
- Sensibilidad.

Validez:

60meses.

Advertencias:

Utilice Pasta para Soldar Plata Morelli (Flux) sobre las superficies de acero inoxidable a unir y para una buena homogeneización, agite antes de usar.

La soldadura fuerte debe realizarse en áreas ventiladas o con extractores para extraer los gases generados durante el uso del Flux y fusión de la propia Soldadura, y como prevención utilizar gafas y mascarilla.

Las piezas soldadas deben lavarse posteriormente, ya que los residuos de Flux son corrosivos y pueden comprometer las superficies "unidas".

Uso en múltiples pacientes y múltiples veces.

No utilice el producto si la embalaje está danada o abierto, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles falsificación de productos.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Codigos:

¹ Organismo de Certificación

Código	Quantidade	CE	Org ¹
35.30.010	01 UN.	-	-
35.30.011	04 UN.	-	-
35.30.013	10 UN.	-	-

Revisión	Cambios
0	Elaboración y disponibilidad en el portal Morelli.
1	Actualización de mascarillas, avisos y ajuste de idioma.
2	Actualización de advertencias.
3	Ajuste de idioma.
4	Inclusión de la indicación del paciente y del usuario previsto.