

Português

Instrução de Uso: IFU-00099 - 0001

MS/ANVISA nº: 10396830049

Nome Técnico ANVISA: Instrumentos auxiliares na prática odontológica

Nome Comercial da Família ANVISA: INSTRUMENTOS PARA ORTODONTIA

Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.

**Fabricado por:**

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiaí, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

DESTACADOR PARA TAMPA DE TUBOS



O destacador para tampa de tubos conversíveis é um instrumento que auxilia ao profissional quando este deseja promover a remoção da tampa dos tubos ortodônticos conversíveis. Este recurso é muito útil quando se necessita que o tubo apresente um comportamento mais próximo ao comportamento de um bráquete, favorecendo, dentre outras características, o manuseio do fio ortodôntico.

Indicação de uso:

O produto possui a finalidade de ser utilizado para a extração da tampa dos tubos conversíveis simples, duplos e triplos, sendo o destacador (haste) sempre utilizado em conjunto com a lâmina.


Manuseio:

Para instalação ou substituição da lâmina, proceda conforme a seguir:

Para instalação da lâmina:

01 - Encaixe a lâmina no canal existente na extremidade do cabo. Note que a extremidade de trás da lâmina ficará ligeiramente flexionada. Neste momento, desloque a mesma no sentido indicado pela seta até se atingir o fim de curso.

02 - Observe que ao final deste procedimento, a lâmina retornará à sua condição inicial (plana).

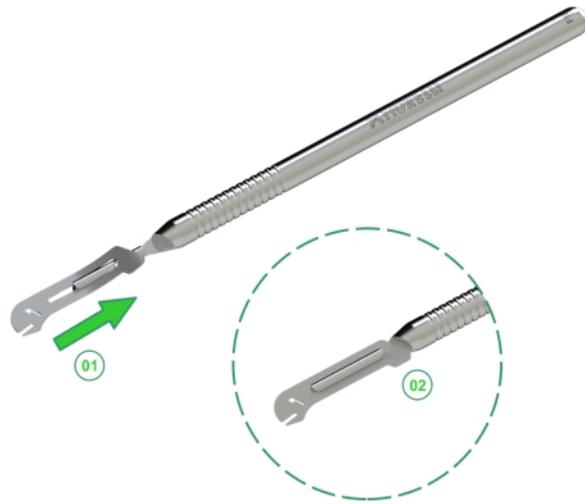

Para substituição da lâmina:

03 - Pressione a extremidade de trás da lâmina, flexionando-a ligeiramente até ocorrer seu desencaixe.

04 - Em seguida, desloque a mesma para frente (sentido indicado pela seta), até que ela se solte completamente do alojamento.



Para proceder ao destacamento da tampa do tubo conversível:

01 - Encaixe a ponta da lâmina no interior do slot do tubo conversível;

02 - Em seguida, proceda com movimento de alavanca, no sentido indicado pela seta existente na lâmina;

03 - Para se obter a remoção completa da tampa, pode ser necessário executar este movimento mais de uma vez.



Contraindicações:

A Morelli fornece este (s) produto (s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar condições que tornem este (s) produto (s) contraindicado (s) ao tratamento. Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso, não são identificadas contraindicações referentes ao uso deste (s) produto (s).

Efeitos colaterais:

A Morelli fornece este(s) produto(s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar e comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito(s) colateral(ais) indesejado(s). Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso e contraindicações, não são identificados efeitos colaterais referentes ao uso deste(s) produto(s).

Validade:

120 meses.

Limpeza e esterilização:

Para uma limpeza e esterilização segura e eficaz, utilizar as "INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO", em www.morelli.com.br/IFU. Para facilitar a busca no site, o documento encontra-se junto ao código do produto.

Advertências:

Produto não esterilizável em estufa seca.

Após esterilizado, manter o produto em sua embalagem de esterilização, armazenado em um lugar seco e livre de sujidades.

Abrir somente no momento de uso.

O fim da vida útil do instrumento é também determinado pelo desgaste e danos causados pelo uso.

Os produtos devem ser utilizados apenas por profissionais qualificados e devem ser usados apenas para a finalidade a que se destinam.

Todos os produtos são enviados na condição não estéril e devem ser limpos e esterilizados antes do primeiro uso, bem como antes de cada uso subsequente.

Verifique as condições de uso do instrumento antes de cada procedimento, respeitando sua vida útil e garantindo assim seu perfeito funcionamento. Seu processamento foi validado em até 100 utilizações, após este período recomenda-se sua substituição.



Produto esterilizado por vapor em autoclave até 121°C / 250°F. Por serem usados no corpo humano podem apresentar riscos associados ao uso, devendo ser garantida sua esterilidade.

Evite a queda do instrumento, uma vez que isso pode causar prejuízos ao seu funcionamento. Caso seja identificado algum tipo de dano ao dispositivo, o qual possa comprometer sua função, recomenda-se sua substituição.

Tenha atenção especial quando no momento da finalização do procedimento de destacamento da tampa, uma vez que ao se desprender totalmente do tubo, a tampa poderá cair no ambiente bucal.



Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a estes metais. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico.

Uso em múltiplos pacientes e múltiplas vezes.

Em caso de problemas graves decorrentes do uso do produto, é importante que o profissional qualificado e/ou paciente informem ao fabricante ou a autoridade competente do país em que reside.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Códigos:

¹ Organismo Certificador

Código	Quantidade	CE	Org ¹
75.01.024	01 UN.	C E	2797
75.01.025	05	C E	2797

Revisão	Alterações
0	Elaboração e disponibilização no portal Morelli.
1	Revisão da advertência e inclusão do Organismo Certificador.