

Português

Instrução de Uso: IFU-00091 - 0001

MS/ANVISA nº: 10396830049

Nome Técnico ANVISA: Instrumentos auxiliares na prática odontológica

Nome Comercial da Família ANVISA: INSTRUMENTOS PARA ORTODONTIA

Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 0121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. Para composições químicas solicite a Folha de Segurança do produto.



Fabricado por:

Dental Morelli Ltda.

📍 Alameda Jundiaí, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil

☎ Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsável Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985



Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras – Portugal – 2780125

☎ Tel.: 351 21 4439292

PINÇAS ORTODÔNTICAS



As pinças ortodônticas consistem em instrumentos, com formatos adequados para posicionamento de bráquetes, tubos ou elásticos de ligadura, assim como outros acessórios ortodônticos.

Indicação de uso:

Descrição das situações clínicas de aplicação mais comuns:

Pinça ortodôntica para tubos:

- Apreensão de tubos molares e acessórios ortodônticos.

Pinça “Plic”:

- Colocação de elásticos, molas, stops redondo, entre outros.

Pinça ortodôntica:

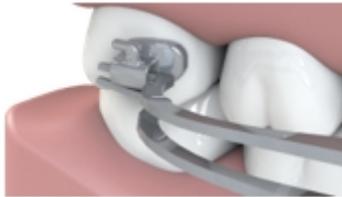
- Permite a apreensão segura de bráquetes e acessórios

Indicação de Paciente: todas as idades com indicação de tratamento ortodôntico.

Usuário Pretendido: uso e instalação por profissional qualificado.

Manuseio:**Pinça para tubo:**

Apreender o tubo pelo slot ou pelas laterais, posicionando-o na face vestibular dos dentes de acordo com a prescrição.

**Pinça ortodôntica:**

Apreender bráquete pelas laterais, posicionando-o na face vestibular dos dentes de acordo com a prescrição. Utilizando o lado oposto verifique o posicionamento com a escala graduada.

**Pinça "plic":**

A pinça "plic" pode ser utilizada em diversas situações como na instalação/remoção, de acessórios e ligaduras elásticas.

**Limpeza e esterilização:**

Para uma limpeza e esterilização segura e eficaz, utilizar as "INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO", em www.morelli.com.br/IFU. Para facilitar a busca no site, o documento encontra-se junto ao código do produto.

Contraindicações:

A Morelli fornece este (s) produto (s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar condições que tornem este (s) produto (s) contraindicado (s) ao tratamento. Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso, não são identificadas contraindicações referentes ao uso deste (s) produto (s).

Efeitos colaterais:

A Morelli fornece este(s) produto(s) apenas a profissionais qualificados, dos quais é de inteira responsabilidade identificar e comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito(s) colateral(ais) indesejado(s). Desde que utilizado corretamente, para a finalidade indicada, e respeitadas as instruções de uso e contraindicações, não são identificados efeitos colaterais referentes ao uso deste(s) produto(s).

Validade:

120 meses.

Advertências:

Produto não esterilizável em estufa seca.

Após esterilizado, manter o produto em sua embalagem de esterilização, armazenado em um lugar seco e livre de sujidades.

Abrir somente no momento de uso.

O fim da vida útil do instrumento é também determinado pelo desgaste e danos causados pelo uso.

Os produtos devem ser utilizados apenas por profissionais qualificados e devem ser usados apenas para a finalidade a que se destinam.

Todos os produtos são enviados na condição não estéril e devem ser limpos e esterilizados antes do primeiro uso, bem como antes de cada uso subsequente.

Verifique as condições de uso do instrumento antes de cada procedimento, respeitando sua vida útil e garantindo assim seu perfeito funcionamento. Seu processamento foi validado em até 100 utilizações, após este período recomenda-se sua substituição.



Produto esterilizado por vapor em autoclave até 121°C / 250°F. Por serem usados no corpo humano podem apresentar riscos associados ao uso, devendo ser garantida sua esterilidade.



Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a estes metais. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico.

Uso em múltiplos pacientes e múltiplas vezes.

Em caso de problemas graves decorrentes do uso do produto, é importante que o profissional qualificado e/ou paciente informem ao fabricante ou a autoridade competente do país em que reside.

Para uso exclusivo de profissional qualificado.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Códigos:

¹ Organismo Certificador

Código	Quantidade	CE	Org ¹
75.01.022	01 UN.	C E	2797
75.01.027	01 UN.	C E	2797
75.01.028	01 UN.	C E	2797
75.01.064	01 UN.	C E	2797

Revisão	Alterações
0	Elaboração inicial
1	Revisão da advertência e inclusão do Organismo Certificador.